



**ZEISS**

**SOCZEWKI  
KONTAKTOWE**

**ELEKTRONICZNY**

**PORADNIK UŻYTKOWNIKA**

# GRATULACJE

## TWOJE SOCZEWKI TO PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

**Soczewki kontaktowe ZEISS nie są produktem masowym**, to gwarancja jakości. Pierwsze soczewki zostały wyprodukowane w latach trzydziestych dwudziestego wieku, przez ten czas przeszły liczne modyfikacje aby osiągnąć współczesny poziom.

### FILTR UV



Filtr UV w naszych soczewkach jednodniowych chroni twoją rogówkę przed szkodliwym promieniowaniem.

### SKI-TIP®



Ski-tip® - to unikatowy profil wykończenia krawędzi, wymuszający ciągły obieg filmu łzowego pod soczewką. Ciągły obieg filmu łzowego to mniejsze ryzyko odkładania się osadów mogących powodować podrażnienia. Tylko soczewki ZEISS posiadają Ski-tip®.

### 69% WODY



Uwodnienie to parametr wpływający na komfort użytkowania soczewek kontaktowych. Soczewki miesięczne ZEISS Air zawierają aż 69% wody to dzięki wysokiemu uwodnieniu są takie delikatne.

# STOP

## ZANIM ZAŁOŻYSZ PIERWSZĄ PARĘ, PRZECZTAJ ZALECENIA !

- Nie należy stosować żadnych soczewek kontaktowych których termin już upłynął.
- Soczewki kontaktowe mogą być stosowane jedynie przez okres przewidziany przez producenta
- Przy pierwszym użyciu należy zakładać soczewki tylko z opakowań fabrycznie zamkniętych i nie uszkodzonych.
- Chroń soczewki przed kontaktem z mydłem, kosmetykami i innymi produktami chemicznymi.
- Podczas użytkowania soczewek kontaktowych nie powinno się używać leków ani kropli do oczu, chyba że są zalecane przez prowadzącego lekarza okulistę.
- W trakcie używania kosmetyków w aerozolu (lakier do włosów) należy unikać kontaktu z powierzchnią soczewki.
- Soczewki kontaktowe należy przechowywać tylko w płynie do pielęgnacji soczewek.
- Soczewki kontaktowe powinno się dezynfekować codziennie lub po każdorazowym zdjęciu z oka.
- Po każdym użyciu płyn należy bezwzględnie wylać, a pojemnik przepłukać nową porcją płynu pielęgnacyjnego i zostawić otwarty do wyschnięcia.

- Nie należy używać wody, śliny itp. Do płukania i nawilżania soczewek kontaktowych.
- Nie wolno mieszać różnych płynów do pielęgnacji
- Nie powinno się używać soczewek kontaktowych podczas kontaktu z oparami chemicznymi i przy wysokim stopniu zapylenia.
- Nigdy nie przechowuj soczewek w samej soli fizjologicznej gdyż nie zdezynfekuje ona ani nie oczyści ona soczewek z osadów białkowo lipidowych.
- Należy przestrzegać bezwzględnie terminów wymiany soczewek i wizyt kontrolnych u specjalisty.
- Nigdy nie należy używać pęsety paznokci lub innych ostrych przedmiotów w celu wyciągnięcia soczewki z oka.
- Jeżeli pojawi się podrażnienie oczu, zaczerwienienie nadmierne łzawienie lub zaburzenie widzenia niezwłocznie zdjęć soczewki i skontaktować się z lekarzem okulistą.

# FAQ

CZYLI NAJCZĘŚCIEJ  
ZADAWANE PYTANIA  
ODNAJDZIESZ NA:

[www.ZdroweOczy.org](http://www.ZdroweOczy.org)



# ZAKŁADANIE SOCZEWEK

## ZAKŁADANIE SOCZEWEK NIE JEST PROBLEMEM




Umyj dokładnie ręce – higiena przy kontakcie z soczewkami jest najważniejszym przykazaniem

- Najpierw wyjmij soczewkę do oka a prawego, w celu uniknięcia pomyłki.




- Wyjmij z pojemniczka i ułóż na palec wskazujący prawej dłoni.

- Na linii wzroku oceń jej stronę (ewentualnie przełoż na prawą).

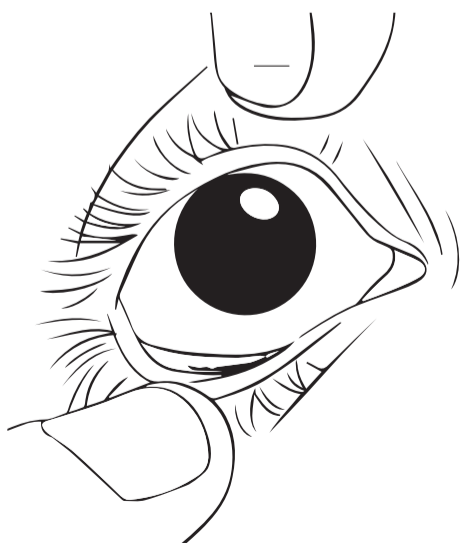

- Palcem środkowym prawej dłoni rozszerz powiekę dolną, a palcem wskazującym prawej dłoni przytrzymaj powiekę górną.

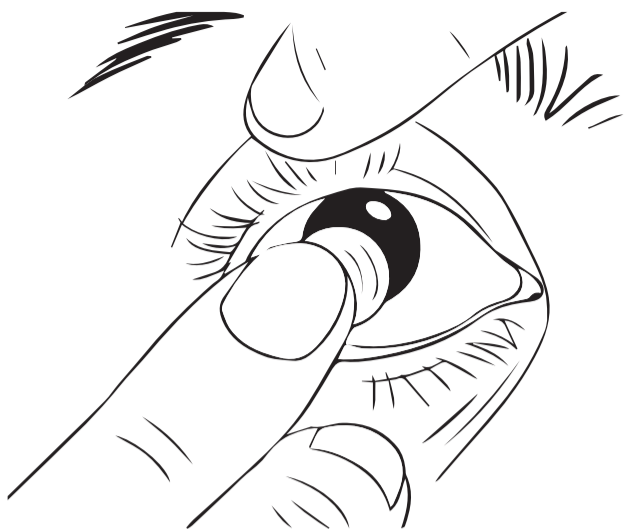

- Popatrz delikatnie w górę nałoż soczewkę palcem wskazującym prawej dłoni na oko.



- Opuść ostrożnie powieki, popatrz w kilku kierunkach pomrugaj.

- Tą sama procedurę zastosuj na lewym oku.
- Jeżeli w trakcie zakładania soczewka przypadkowo spadnie należy ją optukać w płynie i ponownie założyć.

## VIDEO



JEŻELI NASZE IKONY  
NIE ROZJAŚNIAJĄ SYTUACJI  
OBEJRZYJ PORADNIK NA

:

[www.ZdroweOczy.org](http://www.ZdroweOczy.org)